

薬剤感受性検査用プレート

嫌気性菌の薬剤感受性検査用

ライサス嫌気性菌感受性プレート「ニッスイ」RSMA1

体外診断用医薬品 届出番号 第13A2X00006000019号

嫌気性菌用

製品コード **04462**

包装 **20枚**

希望納入価格 **30,000円**

製品概要

本製品は、嫌気性菌の薬剤感受性検査「最小発育阻止濃度（MIC）の測定」を行う全自動迅速同定・感受性測定装置ライサスシリーズ専用のプレートである。
薬剤感受性検査用として、17種の抗菌薬のMICを測定する96ウェルで構成される。

使用目的および使用方法

細菌検査における起因菌（嫌気性菌）の薬剤感受性検査を目的とする。プレートは冷蔵庫から取り出し、30分間室温に放置後、アルミラミネートパッケージを開封してそのまま使用する。
検査材料あるいは検査対象となる集落を非選択培地（ABHK寒天培地など）に接種し、所定温度/時間で培養した新鮮培養菌の集落からニッスイチューブ滅菌水にてマックファーランド1.0に調整する。この菌液10 μ lとニッスイチューブプルセラピューシオンならびに本製品をライサスシリーズに装着して使用する。

結果・判定方法

判定はライサスシリーズにより自動的に行う。発育コントロールウェルと各抗菌薬ウェルの吸光度（濁度）変化の比較を行い、専用のアルゴリズムによりMICが判定され、MICの解釈はCLSI Approved Standard (M11)、CLSI Informational Supplement (M100) に準拠して判定する。

貯法・使用期限

冷所（2～10℃）に保存。
1年間。

組成

添付文書に記載

参照規格

Clinical and Laboratory Institute, CLSI
Approved Standard(M11)
Clinical and Laboratory Institute, CLSI
Informational Supplement(M100)

精度管理

添付文書に記載される用法・用量に従って操作するとき、下記の判定基準を満たす。

【使用菌株】

<薬剤感受性>

Bacteroides fragilis ATCC 25285

Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741

【判定基準】

<薬剤感受性>

予め設定される規格値内のMICを示す。

同上



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6

URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>

E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]

Tel.03(5846)5707

SD1810A