

製品コード **04522**

プレソルブ「ニッスイ」

使用法

喀痰は粘稠性が高く、そのままでは塗抹や培養が困難であり、分離効率を高め、定量性を持たせるためには喀痰を均質化する必要がある。

本品は酵素の作用による喀痰溶解液であり、菌へのダメージが少ない。

プレソルブのアルミキャップとゴム栓をはずし袋の中のジョイントを無菌的にはめ込む。ジョイントの反対側を溶解液ボトルに取り付け、数回転倒混和して完全に溶解後使用する。

〔検体の処理法〕

喀痰を試験管にとり、等量のプレソルブ試液を加え、十分に混和して均質化する。

貯法・使用期限

冷所(2~10℃)に保存。
1年間。

包装 セミアルカリプロテアーゼ120mL用x6本
溶解液120mLx6本、ジョイントx6個

希望納入価格 **10,800円**

組成

〔セットの内容〕

セミアルカリプロテアーゼ……36万U/バイアル
溶解液
pH緩衝剤……………1.674g/120mL

〔注意〕

調製後の試液は5℃保存で7日以内に使用すること。