

# セントラップMB試薬「ニッスイ」

## セントラップMB A試薬

NALC-NaOH溶液

## セントラップMB B試薬

担体生成試薬

## セントラップMB C試薬

けん濁試薬

### 使用法

喀痰に粘液溶解剤のNALC(N-アセチル-L-システイン)を加えてその消化を促進し、低濃度のNaOHで汚染を除去後、緩衝液で希釈、遠心集菌する方法で、その沈渣を再浮遊させて培地へ接種する。  
本品は可溶性リン酸カルシウムを主成分とする担体を生成させることで、検体中の抗酸菌を短時間(10秒)で集菌、回収する試薬である。

### 注意

エアロゾルの発生、散布、吸引の防止に十分に留意し、操作は安全キャビネット内で行う。

製品コード **04525**

包装 1式(下記参照)

希望納入価格 7,000円

製品コード **04526**

包装 1式(下記参照)

希望納入価格 8,200円

製品コード **04527**

包装 1式(下記参照)

希望納入価格 7,000円

### 貯法・使用期限

室温に保存。  
1年間。

### セット内容

セントラップMB A試薬  
NALC試薬.....75mL用×10包  
水酸化ナトリウム液...75mL×10本  
セントラップMB B試薬  
B-1試薬.....500mL×4本  
B-2試薬.....10mL×4本  
セントラップMB C試薬  
C-1試薬.....40mL×4本  
C-2試薬.....40mL用×4本