

NISSUI



抗酸菌検査用喀痰前処理キット

セントラップ[®]MB

「ニッスイ」

SAP-NALC-NaOH処理の集菌時間を大幅に短縮!!

操作方法

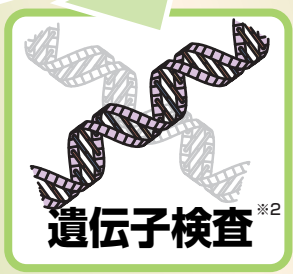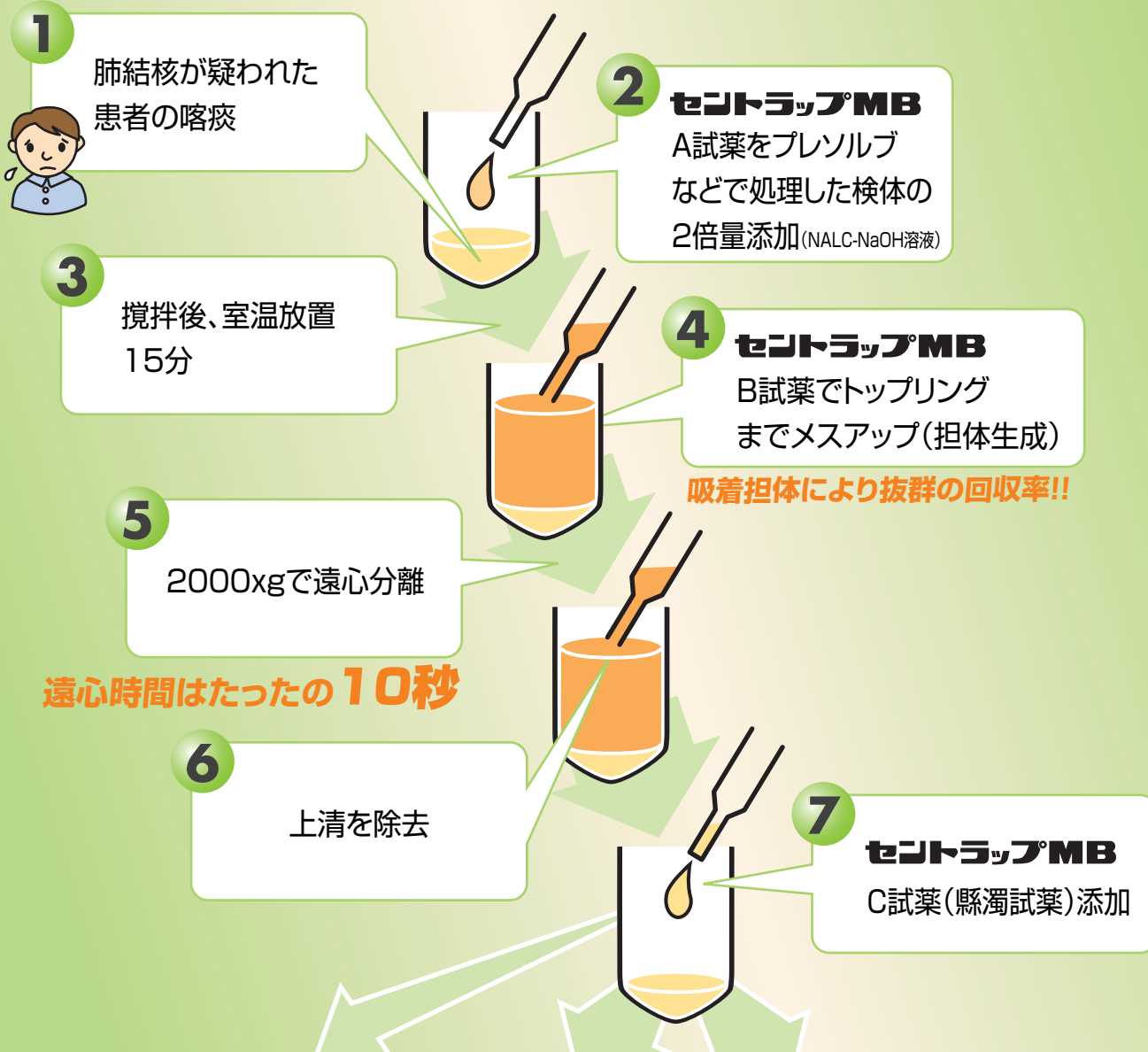

※1:当培地に接種した場合、*Paeriginosa*, *S. marcescens*およびグラム陽性球菌による雑菌汚染が発生する場合があります。シュウ酸以外の酸処理をすることをおすすめします。

※2:0.05N HCLの添加は核酸増幅の直前に行い、外部委託をする場合はHCLを加えずそのまま委託先の規定に基づいて提出してください。

吸着担体により速やかに集菌できます。

少ない菌の回収も確実に出来ます。

処理後の検体は、塗抹染色・小川培地・液体培地および
遺伝子検査にも使用できます。

● 抗酸菌検査用喀痰前処理キット

品名	製品コード	試薬名	包装	価格	貯法・使用期限
セントラップMB A試薬 (NALC-NaOH溶液)	04525	NALC試薬	75mL用 x 10包	7,000	室温保存 製造後12ヵ月間
		水酸化ナトリウム液	75mL x 10本		
セントラップMB B試薬 (担体生成試薬)	04526	B-1液	500mL x 4本	8,200	
		B-2液	10mL x 4本		
セントラップMB C試薬 (懸濁試薬)	04527	C-1液	40mL x 4本	7,000	
		C-2試薬	40mL用 x 4本		

● セミアルカリプロテアーゼ(SAP)による喀痰溶解剤

品名	製品コード	試薬名	包装	価格	貯法・使用期限
プレソルブ「ニッスイ」	04522	プレソルブ	120mL用 x 6本	10,800	冷所(2~10℃)保存 製造後12ヵ月間
		溶解液	120mL x 6本		
		ジョイント	6ヶ		

● 抗酸菌検査関連製品

用途	品名	製品コード	包装	価格	貯法・使用期限
喀痰前処理用	NALC-NaOH試薬「ニッスイ」※	04515	1セット	13,500	室温保存 製造後12ヵ月間
※注意:本品のNALC-NaOH試薬はセントラップMB A試薬の代わりには使用できません。					
分離培地	1%小川培地「ニッスイ」	05301	60本	11,400	冷暗所(2~10℃)保存 製造後6ヵ月間
	3%小川培地「ニッスイ」	05302	60本	11,400	
	2%小川IPS培地「ニッスイ」	05323	60本	11,400	

製造発売元



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野3-23-9
URL : <http://www.nissui-pharm.co.jp>

お問い合わせ先 : カスタマーサポート
Tel.03(5846)5707