

腸内細菌分離用

SSB寒天培地(顆粒)「ニッスイ」

SSB Agar "Nissui"

使用法

本培地は加温溶解して使用する。高圧蒸気滅菌してはいけない。
大腸菌、雑菌の発育抑制はSS寒天培地よりもやや弱い、SS寒天培地上では発育困難な*Salmonella* (*S.pullorum*, *S.senteritidis*など)もよく発育する。

乳糖および白糖の分解能を利用しているので病原菌の鑑別は的確で、*Salmonella*、赤痢菌などの乳糖、白糖非分解菌は淡青色の半透明集落をつくる。乳糖、白糖分解菌は赤紫色の混濁した集落を形成する。
*Proteus*中、白糖分解菌は淡赤紫色の集落をつくり、硫化水素産生菌の集落はSS寒天培地のそれよりも黒変しやすいので容易に鑑別できる。

製品コード **05025**

包装 300g
希望納入価格 9,300円

製品コード **05024**

包装 20L(60gx20)
希望納入価格 33,100円

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

60.0 g (1L分)中
肉エキス 3.0g
ペプトン 8.0g
クエン酸ナトリウム 5.0g
チオ硫酸ナトリウム 2.0g
クエン酸鉄アンモニウム 1.0g
乳糖 10.0g
白糖 10.0g
胆汁酸塩 5.0g
ニュートラルレッド 0.02g
プロムクレゾールパープル 0.01g
カンテン 16.0g
pH7.4 ± 0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A