

腸内細菌分離用

食中毒原性サルモネラ分離用

MLCB寒天培地「ニッスイ」

MLCB Agar "Nissui"

製品コード **05041**

包装 300g

希望納入価格 5,200円

使用法

本培地は加温溶解して使用する。高圧蒸気滅菌してはいけない。
*Salmonella*の分離用に開発された培地で、*Salmonella*以外の菌の発育は強く抑制される。チフス症の原因となるチフス菌やパラチフスA菌などの*Salmonella*の一部も発育を抑制されるので、それらの分離には適さない。

*Salmonella*は硫化水素を産生して黒色の集落を形成するので、*Salmonella*以外の菌が発育しても鑑別は容易である。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

備考

微生物検査必携(1987)
食品衛生検査指針(2004)
衛生試験法注解(1990)

組成

49.0 g (1L分)中
酵母エキス 5.0g
ペプトン 10.0g
ハートエキス末 2.0g
塩化ナトリウム 4.0g
マンニット 3.0g
L-リジン塩酸塩 5.0g
チオ硫酸ナトリウム 4.0g
クエン酸鉄アンモニウム 1.0g
ブリリアントグリーン 0.0125g
クリスタルバイオレット 0.01g
カンテン 15.0g
pH6.8 ± 0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A