

## 腸炎ビブリオ・コレラ菌用

腸炎ビブリオ分離用

### X-VP寒天培地「ニッスイ」

X-VP Agar "Nissui"

製品コード **05135**

包装 300g

希望納入価格 12,000円

#### 使用法

本品102.4gを精製水1,000mLに加温溶解し、約20mLずつシャーレに分注して使用する。高圧蒸気滅菌をしてはならない。

被検材料をそのまま、または増菌培養後塗布し、35～37℃、18～24時間培養する。

腸炎ビブリオは青～青緑色の集落を形成し、*V.vulnificus*、*V.cholerae*、*V.minicus*は淡桃色～赤紫色の集落を、*V.alginolyticus*は発色せず白色集落を形成する。大腸菌群やビブリオ属以外の菌は発育が抑制される。

#### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。  
3年間。

#### 組成

102.4 g (1L分)中

ペプトン	10.0g
酵母エキス	5.0g
白糖	30.0g
チオ硫酸ナトリウム	6.4g
クエン酸ナトリウム	10.0g
塩化ナトリウム	20.0g
ビルビン酸ナトリウム	5.0g
胆汁酸塩	3.0g
選択剤	0.27g
発色酵素基質	0.25g
カンテン	12.5g

pH8.8±0.2



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A