

腸内細菌分離用

サルモネラ分離用

X-SAL寒天培地「ニッスイ」(顆粒)

X-SAL Agar "Nissui"

製品コード **05140**

包装 300g

希望納入価格 16,000円

使用法

本品68.2gを精製水1,000mLに加温溶解し、約20mLずつシャーレに分注して使用する。(高圧蒸気滅菌をしてはならない)。

被検材料を増菌培養後塗布し、35～37℃、18～24時間培養する。

硫化水素産生サルモネラは黒色～深緑色、硫化水素非産生サルモネラは緑色の集落を形成する。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

68.2 g (1L分)中

ペプトン	18.5g
肉エキス	2.5g
酵母エキス	1.0g
乳糖	10.0g
白糖	10.0g
L-リジン塩酸塩	5.0g
チオ硫酸ナトリウム	2.0g
クエン酸鉄アンモニウム	1.0g
クエン酸ナトリウム	1.0g
胆汁酸塩	2.0g
ニュートラルレッド	0.03g
発色酵素基質	0.2g
カンテン	15.0g

pH7.0±0.2



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A