

製品コード 05180

## チトクローム・オキシダーゼ試験用ろ紙「ニッスイ」

Cytochrome Oxidase Test Strip "Nissui"

包装 15枚

希望納入価格 1,000円

## 使用法

本品は、細菌におけるチトクローム・オキシダーゼの有無を簡易かつ正確に検査できるように開発されたものである。本品1片をシャーレに入れ、精製水（鉄イオンが存在すると偽陽性となることがある）数滴を滴下してろ紙全体を湿らせ、ただちにその上に固形培地上の培養菌を白金耳（白金製）またはガラス棒で塗布する。

**判定:**陽性菌は1分以内に塗布部分が深青色を呈する。  
陰性菌は変化しない。

## 注意

- ①糖を含む培地で検査すると偽陰性となることがある。
- ②血寒上のコロニーで検査すると偽陽性となることがある。

## 貯法・使用期限

密栓して冷所(2~10℃)に保存。  
(使用前にすでに青色を呈しているものは使用できない)

## 組成

## 備考

食品衛生検査指針(2004)