

腸内細菌鑑別用

β -ガラクトシダーゼ検査用

ONPGディスク「ニッスイ」

ONPG Disk “Nissui”

製品コード **05182**

包装 50枚

希望納入価格 2,500円

使用法

本品は、 β -ガラクトシダーゼテストが簡易かつ迅速に行えるように開発されたディスクである。

本品1枚を小試験管にとり、滅菌精製水1mLを加える。被検菌1白金耳を接種し、37℃で18～24時間培養後、判定する（早いものでは1～2時間で判定できる）。

判定

陽性：液が黄色となったものを陽性とする。

陰性：液の色は無変化。

貯法・使用期限

密栓して冷所(2～10℃)に保存。
1年間。

備考

微生物検査必携(1987)
食品衛生検査指針(2004)

組成

本ディスク中には、ONPG(o-Nitrophenyl- β -D-galactopyranoside)、ペプトン、リン酸一水素ナトリウムが含まれている。