

ブドウ球菌用

フェニルエチルアルコール寒天培地「ニッスイ」

PEA寒天培地

PEA Agar "Nissui"

製品コード **05246**

包装 100g
希望納入価格 3,200円

使用法

121℃、15分間高圧蒸気滅菌後、シャーレに分注する。
本培地では、大腸菌、*Proteus*などのグラム陰性菌は発育が阻止されるので、これらの菌で汚染された材料からのグラム陽性球菌の分離に適している。
グラム陰性菌が発育しても、その集落は小さく、グラム陽性球菌との鑑別は容易である。
レンサ球菌の分離を目的に使用するときは、本培地に血液を5%に加えた血液寒天にするとよい。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
1年間。

組成

42.5g(1L分)中
ペプトン..... 15.0g
ダイズペプトン..... 5.0g
塩化ナトリウム..... 5.0g
フェニルエチルアルコール..... 2.5g
カンテン..... 15.0g
pH7.3±0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A