

1%小川培地「ニッスイ」

1% Ogawa Medium "Nissui"

注) ゴム栓は「水色」に統一

製品コード **05301**

包装 **60本**

希望納入価格 **11,400円**

使用法

本培地は結核菌の分離培養に用いられるもので、結核菌検査指針(1979年改訂)に従って作られたものである。

分離培養法

かくたんに2% NaOH 水溶液を等量加え、肉眼的に十分均等化するまでかくはん、振とうする。37℃で約30分間放置後、その0.1mLずつを2本以上の培地に流し込み、斜面培地全面に広げる。

貯法・使用期限

冷所(2～10℃)に保存(禁凍結)。
製造の日から6カ月間。

備考

結核菌検査指針(1979)
微生物検査必携(1987)

組成

本培地は「結核菌検査指針」(1979年)に基づいて製造された1%リン酸二水素カリウム培地である。