

## 2%小川 PS 培地「ニッスイ」

2% Ogawa PS Medium "Nissui"

注) ゴム栓は「水色」に統一

製品コード **05323**

包装 **60本**

希望納入価格 **11,400円**

### 使用法

本培地は、幅広い抗酸菌の分離用培地で、1%・3%小川培地と同等の結核菌分離能をもち、さらに非定型抗酸菌の発育性能を強化してある。

### 分離培養法

かくたんに4%NaOH水溶液を等量加え、肉眼的に十分均等化後、直ちにその0.1mLずつを2本以上の培地に流し込み、斜面培地全面に広げる。

### 貯法・使用期限

冷所(2～10℃)に保存(禁凍結)。

製造の日から6カ月間。

### 備考

微生物検査必携(1987)

### 組成

1)原液	
リン酸二水素カリウム	2.0g
グルタミン酸ナトリウム	0.5g
クエン酸マグネシウム	0.1g
溶性デンプン	3.0g
ビルビン酸	0.2mL
精製水	100mL
2)卵液	
全卵液	200mL
グリセリン	4mL
2%マカライトグリーン	4mL