

# 嫌気性菌用

一般的培養・感受性試験用

## 変法GAM寒天培地「ニッスイ」

GAM Agar, Modified "Nissui"

製品コード **05426**

包装 **300g**

希望納入価格 **10,000円**

### 使用法

115℃、15分間高圧蒸気滅菌後シャーレに分注する。

調製した培地はその日のうちに使用するか、嫌気状態で保存する。

本培地は、岐阜大学処方(GAM寒天培地)を改良したもので、臨床材料からの嫌気性菌の分離、嫌気性菌の一般的培養およびサルファ剤以外の薬剤感受性試験などに、従来のどの培地よりもすぐれている。

本品はGAM寒天培地を改良したもので、色がうすく透明性にすぐれている。

### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。

3年間。

### 組成

56.7g(1L分)中

ペプトン	5.0g
ダイズペプトン	3.0g
プロテオーゼペプトン	5.0g
消化血清末	10.0g
酵母エキス	2.5g
肉エキス	2.2g
肝臓エキス	1.2g
ブドウ糖	0.5g
溶性デンプン	5.0g
L-トリプトファン	0.2g
L-システイン塩酸塩	0.3g
チオグリコール酸ナトリウム	0.3g
L-アルギニン	1.0g
ビタミンK1	5mg
ヘミン	10mg
リン酸二水素カリウム	2.5g
塩化ナトリウム	3.0g
カンテン	15.0g

pH7.3 ± 0.1

### 備考

微生物検査必携(1987)