

嫌気性菌簡易培養システム

パウチタイプ

アネロメイト[®]-P「ニッスイ」

使用目的および方法

嫌気培養袋の中に被検材料または被検菌を塗布したシャーレを入れる。
次に酸素検知剤と嫌気培養剤を入れた後、直ちに密封用バーで密閉し、
そのままふらん器に入れて培養する。
アネロメイト-Pの嫌気培養袋に入れられる丸シャーレは2枚である。

注意

酸素検知剤の適用温度範囲は5～35℃で、0℃では検知しない。

製品コード **06593**

包装 50セット(2枚用)
希望納入価格 18,400円

貯法・使用期限

冷暗所(2～10℃)に保存。
1年間。

組 成

[セットの内容]50セット(100検体分)
嫌気培養剤.....50袋
(酸素吸収・炭酸ガス発生剤)
嫌気培養袋.....50袋
酸素検知剤.....50個
密封用バー.....各2本
(袋用180mm、検知剤用120mm)