

# 腸内細菌同定用

ブドウ糖発酵性グラム陰性桿菌同定用

## IDテスト・EB-20「ニッスイ」

体外診断用医薬品 承認番号:(61AM)第3213号

ID Test・EB-20 “Nissui”

製品コード **06626**

包装 25検体用

希望納入価格 13,500円

### 使用法

本品は、微量テスト法と数値同定法の理論に基づいて開発されたもので、オキシダーゼテストの成績と20項目の生化学的性状および運動性のパターンにより、ブドウ糖発酵性グラム陰性桿菌を同定するためのセットである。

### 注意

- ①本品はブドウ糖発酵性グラム陰性桿菌を同定するキットであるから、それ以外の細菌には使用できない。
- ②被検菌は新鮮な純培養菌を用いる。
- ③接種菌液の濃度は一定にする必要がある(マックファーランド1.0:3×10<sup>8</sup>CFU/mL相当)。
- ④PPA、IND、VPの判定に際しては、別売のIDテスト・EB試薬(製品コード06628)を使用する。
- ⑤使用にあたっては解析プロファイルA及びBが必要である。

### 貯法・使用期限

室温に保存(高温不可)。  
1年間。

### 組成

[セットの内容]25検体用  
IDテスト・EBプレート.....20穴×25枚  
IDテスト・EBブイヨン.....2.5mL×25本  
滅菌流動パラフィン.....20mL×1本  
成績表.....13枚×2組

### 備考

微生物検査必携(1987)  
食品衛生検査指針(2004)