

ID テスト・EB-20「ニッスイ」

ID テスト・EB 試薬

体外診断用医薬品 承認番号：(61AM) 第 3213 号

ID Test・EB-20 “Nissui”

ID Test・EB Reagent

使用法

本品は、ID テスト・EB-20「ニッスイ」用試薬で、PPA、IND、VP の 3 項目の判定用試薬である。

PPA：10% 塩化第二鉄試液 1 滴を加えて 1 分以内に判定する。

IND：コバック試液 1 滴を加えて判定する。

VP：40% 水酸化カリウム試液 1 滴および 6% α -ナフトール試液 1 滴を加えて室温で 20 分間放置後判定する。

製品コード **06628**

包装 100 検体用

希望納入価格 7,000 円

貯法・使用期限

冷所(2～10℃)に保存。
1 年間。

組成

〔セットの内容〕100 検体用
10% 塩化第二鉄試液……6mL × 1 本
コバック試液……………6mL × 1 本
④ 40% 水酸化カリウム試液 6mL × 1 本
6% α -ナフトール試液 6mL × 1 本
(6g/100mL エタノール液)