

非発酵性グラム陰性桿菌同定用

ブドウ糖非発酵性グラム陰性桿菌同定用

IDテスト・NF-18「ニッスイ」

体外診断用医薬品 承認番号(O4AM)第1157号

ID Test・NF-18 “Nissui”

製品コード **06629**

包装 25検体用

希望納入価格 14,800円

使用法

本品は、微量テスト法と数値同定法の理論に基づいて開発されたもので、18項目の生化学的性状のパターンにより、ブドウ糖非発酵性グラム陰性桿菌を同定するためのセットである。

注意

- ①本品は、ブドウ糖非発酵性グラム陰性桿菌を同定するキットであるから、それ以外の細菌には使用できない。
- ②被検菌は新鮮な純培養菌を用いる。
- ③接種菌液の濃度は一定にする必要がある(マックファランド0.5:1.5×10⁸CFU/mL)。
- ④IND、NITの判定に際しては、別売のIDテスト・NF試薬(製品コード06631)を使用する。
- ⑤使用にあたっては解析プロファイルが必要である。

貯法・使用期限

室温に保存(高温不可)。
1年間。

組成

[セットの内容]25検体用
NFプレート……………18穴×25枚
NFブイヨン……………2.5mL×25本
滅菌流動パラフィン……………20mL×2本
成績表……………13枚×2組

備考

微生物検査必携(1987)
食品衛生検査指針(2004)