

ブドウ球菌同定用

N-IDテスト・SP-18「ニッスイ」 SP試薬

体外診断用医薬品 承認番号(O4AM)第1072号

N-ID Test・SP-18 “Nissui”
SP Reagent

使用法

本品はN-IDテスト・SP-18「ニッスイ」用試薬で、VP、NITの2項目の判定用試薬である。

VP:40%水酸化カリウム試薬1滴および6% α -ナフトール試液1滴を加えて室温で約15分間(37℃では10分間)放置後判定する。

NIT:亜硝酸塩検出試液I、IIをそれぞれ1滴ずつ加えて3~5分後に判定する。

製品コード **06638**

包装 100検体用
希望納入価格 7,000円

貯法・使用期限

冷所(2~10℃)に保存。
1年間。

組成

[セットの内容]100検体用
①40%水酸化カリウム試液…6mL×1本
6% α -ナフトール試液…6mL×1本
亜硝酸塩検出試液I………6mL×1本
亜硝酸塩検出試液II………6mL×1本