

IDテスト・HN-20ラピッド「ニッスイ」 HN試薬

体外診断用医薬品 承認番号(O4AM)第1146号

ID Test・HN-20 Rapid “Nissui”
HN Reagent

使用法

本品は、IDテスト・HN-20ラピッド「ニッスイ」用試薬で、IND、NIT、NIRの3項目の判定用試薬である。

IND:コバック試液1滴を加えて判定する。

NIT:亜硝酸塩検出試液I、IIをそれぞれ1滴ずつ加えて3～5分後に判定する。陰性のときはさらに亜鉛末を加えて1～2分後に判定する。

NIR:ONPを判定した後に亜硝酸塩検出試液I、IIをそれぞれ1滴ずつ加えて3～5分後に判定する。

製品コード **06640**

包装 100検体用
希望納入価格 7,000円

貯法・使用期限

冷所(2～10℃)に保存。
1年間。

組成

[セットの内容]100検体用
コバック試液……………6mL×1本
亜硝酸塩検出試液I…………6mL×1本
亜硝酸塩検出試液II…………6mL×1本
亜鉛末……………2.5g×1本