

ID テスト・EB-9「ニッスイ」
EB-9 試薬

体外診断用医薬品 承認番号:(07AM) 第 797 号

ID Test・EB-9 “Nissui”
EB9 Reagent

使用法

本品は、ID テスト・EB-9「ニッスイ」用試薬で、IND、VP の 2 項目の判定用試薬である。

IND：コバック試液 1 滴を加えて判定する。

VP：40%水酸化カリウム試液 1 滴および 6% α -ナフトール試液 1 滴を加えて室温で 20 分放置後判定する。

製品コード **06671**

包装 100 検体用
希望納入価格 4,000 円

貯法・使用期限

冷所(2～10℃)に保存。
1 年間。

組成

〔セットの内容〕100検体用
コバック試液……………6mL×1本
④40%水酸化カリウム試液…6mL×1本
6% α -ナフトール試液…6mL×1本