

IDテスト・EB-9「ニッスイ」

体外診断用医薬品 承認番号:(07AM)第797号

ID Test・EB-9 “Nissui”

製品コード **06673**

包装 50検体用

希望納入価格 14,500円

使用法

本品は、微量テスト法と数値同定法の理論に基づいて開発されたもので、9項目の生化学的性状により、乳糖発酵性の腸内細菌科の菌を同定するためのセットである。

注意

- ①本品は、乳糖発酵性の腸内細菌科の菌を同定するものであるから、それ以外の細菌には使用できない。(乳糖非発酵の赤痢菌、サルモネラは属レベルで解析プロファイルに掲載されている。)
- ②ブドウ糖発酵性陽性、オキシダーゼテスト陰性であることを確認しておく。1プレートは2検体分。
- ③IND、VPの判定に際しては、別売のEB9試薬(製品コード06671)を使用する。
- ④接種菌液の濃度は一定にする必要がある(マックファーランド1.0:3×10⁸CFU/mL相当)。
- ⑤プレートはポリスチレン樹脂製である。
- ⑥使用にあたっては解析プロファイルが必要である。

貯法・使用期限

室温に保存(高温不可)。
1年間。

組成

[セットの内容]50検体用
EB9プレート……………2検体用×25枚
EB9ブイヨン……………1.5mL×50本
滅菌流動パラフィン……20mL×2本
成績表……………2検体用×26枚