

細菌鑑別用

肺炎球菌用

鑑別ディスク「ニッスイ」SPチェック

SP Check

製品コード **09703**

包装 50枚
希望納入価格 1,270円

使用法

本品は、ペニシリン感受性・耐性肺炎球菌を判定するために開発された、ベンジルペニシリンカリウム12 μ g(2単位)含有ディスクである。
被検菌を接種した寒天平板上にディスクを置き、35℃、5～7%炭酸ガス条件下で、16～18時間培養する。

貯法・使用期限

冷所に保存し、1年6カ月間。

〔注意〕

使用する血液寒天培地によって阻止円直径は影響を受けるので、感性ディスク用培地-Nに脱線維血液を5%添加した血液寒天培地を使用するのが望ましい。

組成

記号	成分	含量
PCG2	ベンジルペニシリンカリウム	12 μ (2単位)

〔PSSP/PRSPの鑑別〕

32mm以上…ペニシリン感性肺炎球菌(PSSP)
31mm以下…ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)