

細菌鑑別用

A群β型レンサ球菌用

鑑別ディスク「ニッスイ」バシトラシン(BC)

Bacitracin

製品コード **09897**

包装 50枚
希望納入価格 1,270円

使用法

本品は、β型レンサ球菌のうち、A群菌がバシトラシンに特に感受性が高い事実を応用して、A群β型レンサ球菌をその他のβ型レンサ球菌から簡易かつ正確に鑑別するために工夫・創製されたものである。被検菌1白金耳を培地上に塗布し、バシトラシンディスクを置いて直ちに35℃で1夜(16～24時間)培養する。

貯法・使用期限

室温に保存し、1年6カ月間。

〔注意〕

使用する血液寒天培地によって阻止円直径は影響を受けるので、感性ディスク用培地-Nに脱線維血液を5%添加した血液寒天培地を使用するのが望ましい。

組成

記号	成分	含量
BC	バシトラシン	2単位

〔A群β型レンサ球菌の鑑別〕
バシトラシンディスクによる阻止円直径：
18mm以上……A群β型レンサ球菌
14mm以下……A群以外のβ型レンサ球菌