

## 発育要求性の厳しい菌群用

ニッスイプレート

# 羊血液寒天培地EX

Nissui Plate Sheep Blood Agar EX

製品コード

50002

包装

100枚

希望納入価格

25,000円

### 製品概要

本品はβ-NADの添加により、肺炎球菌、レンサ球菌、髄膜炎菌に加え、ヘモフィルスの分離培養を可能とした培地である。溶血性検査にも好適である。

### 使用法

臨床検体を白金耳等を用いて画線塗抹する。  
35±1℃で18～24時間、好気あるいは炭酸ガス培養（5～10%の二酸化炭素環境下）する。

### 貯法・使用期限

冷所（4～10℃）に保存（禁凍結）。  
2ヵ月。

### 参照

### 基本組成

培地1L中  
ペプトン ..... 20.0g  
ダイズペプトン ..... 5.0g  
塩化ナトリウム ..... 4.5g  
発育因子 ..... 3.2g  
β-NAD ..... 0.1g  
ニコチンアミド ..... 1.0g  
ヒツジ脱線維血液 ..... 50.0mL  
カンテン ..... 15.0g  
pH7.3±0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A