

## 腸内細菌分離用

ニッスイプレート

# マッコンキー寒天培地

Nissui Plate MacConkey Agar

製品コード

**51015**

包装

**10枚**

希望納入価格

**1,400円**

製品コード

**50006**

包装

**100枚**

希望納入価格

**14,000円**

### 製品概要

本培地はグラム陽性球菌の発育は抑制するが、グラム陰性桿菌に対する選択性はほとんどないのでSS寒天培地に生え難い菌もよく発育し、腸内細菌科細菌の分離に使用できる。

### 貯法・使用期限

冷所（4～10℃）に保存（禁凍結）。  
3ヵ月。

### 基本組成

本品はマッコンキー寒天培地「ニッスイ」を常法通り調製し、無菌的にシャーレに分注し、凝固させたものである。

### 使用法

検体を画線塗抹し、35±1℃で18～24時間好気培養する。*Salmonella*、赤痢菌などの乳糖非分解菌は半透明の集落を形成する。大腸菌などの乳糖分解菌の集落はレンガ色を呈し、周囲に淡桃色かレンガ色の沈殿を生ずる。

### 参照



**日水製薬株式会社**

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A