

生培地

ニッスイプレート

ABHK寒天培地

Nissui Plate ABHK (Anaerobic Blood Hemin vitamin K₁) Agar

使用法

本品は無菌的に調製され、嫌氣的条件下で袋に入れてあるので、そのまま使用することができる。平板培地の表面が過度に湿っているときは、乾燥させてから使用する。特に、PRAS (Pre-Reduced Anaerobically Sterilized) 培地として用いるときは、嫌氣的条件下で乾燥させる。

本培地は、プルセラ寒天をベースに、発育因子としてヘミン、L-アルギニン、ビタミンK₁およびウサギ溶血液が添加されているため、嫌気性菌全般にすぐれた発育性能を示し、黑色色素産生菌の鑑別も明りょうである。

製品コード **50028**

包装 100枚
希望納入価格 17,000円

貯法・使用期限

4~10℃に保存(禁凍結)。
3カ月間。

製品コード **51040**

包装 10枚
希望納入価格 4,500円

組成

培地1L中
ペプトン.....20.0g
酵母エキス.....2.0g
L-アルギニン.....1.0g
L-システイン塩酸塩.....0.4g
ブドウ糖.....1.0g
塩化ナトリウム.....5.0g
亜硫酸ナトリウム.....0.1g
ビルビン酸ナトリウム.....1.0g
ヘミン.....10mg
ビタミンK₁.....10mg
カンテン.....15.0g
ウサギ溶血液.....25mL
ヒツジ脱線維血液.....25mL
pH7.1±0.2



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A