

生培地

ニッスイプレート

羊血液寒天培地

Nissui Plate Sheep Blood Agar

製品コード **51001**

包装 10枚

希望納入価格 1,800円

使用法

本品は無菌的に調製されているので、そのまま使用することができるが、平板培地の表面が凝固水で湿っているときは、乾燥させてから使用する。

本品は各種臨床材料からの病原菌の分離や溶血性検査のために使用する。

A群レンサ球菌を検査材料から分離する場合は、ローソク法または炭酸ガスを5～10%にまぜた空気中で培養するのが効果的である。

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
2.5カ月間。

組成

本品は血液寒天基礎培地にヒツジ脱線維血液を5%の割合に加えて調製し、1枚あたり18mLを無菌的にシャーレに分注し、凝固させたものである。

備考

微生物検査必携(1987)
衛生試験法注解(1990)
食品衛生検査指針(2004)