

生培地

ニッスイプレート

DHL寒天培地

Nissui Plate DHL Agar

製品コード **51008**

包装 10枚

希望納入価格 1,000円

使用法

本品は無菌的に調製されているので、そのまま使用することができるが、平板培地の表面が凝固水で湿っているときは、乾燥させてから使用する。

本培地は選択力は弱いですが、SS寒天培地上に発育し難い赤痢菌、*Salmonella*をもよく発育させる。

また大腸菌の分離培地としても用いられる。

乳糖、白糖非分解菌は無色透明の、SS寒天培地におけるよりは比較的大きな集落を形成する。

乳糖、白糖分解菌は赤色不透明な集落をつくるので、鑑別は容易である。

硫化水素産生菌は黒色集落をつくりやすい。

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
2カ月間。

組成

本品はDHL寒天培地「ニッスイ」を常法通り調製し、無菌的にシャーレに分注し、凝固させたものである。

備考

微生物検査必携(1987)
衛生試験法注解(1990)
食品衛生検査指針(2004)