

分画培地

ニッスイ分画プレート

羊血液寒天／DHL

Nissui Separated Plate Sheep Blood Agar/DHL Agar

製品コード **51009**

包装 10枚

希望納入価格 2,000円

使用法

本品は無菌的に調製されているので、そのまま使用することができるが、培地表面が凝固水で過度に湿っているときは、乾燥させてから使用する。

2種類の培地が、シャーレ中央の隔壁よりも高く充てんされているので、検体の塗布は1ステップで行うことができる。またスパイラルプレーター等の自動機器にも適用できる。

注意

検体を塗布した際、発育する菌種、培養時間によっては隔壁付近の一部に培地間の影響が見られる場合がある。

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
2カ月間。

組成

本品は2分画シャーレに羊血液寒天培地とDHL寒天培地「ニッスイ」をそれぞれ無菌的に分注し、凝固させたものである。