

生培地

ニッスイプレート

ドリガルスキー改良培地

Nissui Plate BTB Lactose Agar

製品コード **51010**

包装 10枚

希望納入価格 1,200円

使用法

本品は無菌的に調製されているので、そのまま使用することができるが、平板培地の表面が凝固水で湿っているときは、乾燥させてから使用する。

本培地には選択剤が含まれていないので、検体の接種はごく微量にとどめる。

本培地にはSS寒天培地上に発育し難い病原菌も発育する。

本培地上で乳糖分解菌は黄色集落を形成し、乳糖非分解菌は無色半透明の集落を形成する。

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
6カ月間。

組成

本品はドリガルスキー改良培地「ニッスイ」を常法通り調製し、無菌的にシャーレに分注し、凝固させたものである。

備考

微生物検査必携(1987)
衛生試験法注解(1990)
食品衛生検査指針(2004)