

生培地

ニッスイプレート

SS寒天培地

Nissui Plate SS Agar

製品コード **51012**

包装 10枚

希望納入価格 1,000円

使用法

本品は無菌的に調製されているので、そのまま使用することができるが、平板培地の表面が凝固水で湿っているときは、乾燥させてから使用する。

本培地は、大腸菌、雑菌の発育を抑制するので、*Salmonella*、赤痢菌を選択的に分離することができる。

大部分の硫化水素産生菌の集落は黒変するので、よりの確に病原菌を鑑別できる。

Salmonella、赤痢菌などの乳糖非分解菌は半透明集落を形成する。乳糖分解菌は赤色集落を形成する。

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
3カ月間。

組成

本品はSS寒天培地「ニッスイ」を常法通り調製し、無菌的にシャーレに分注し、凝固させたものである。

備考

微生物検査必携(1987)
衛生試験法注解(1990)
食品衛生検査指針(2004)