

## 分画培地

ニッスイ分画プレート

# BCP 不含MS-CFX/変法卵黄加マンニット食塩EX

Nissui Separated Plate MS-CFX Agar/Mannitol Salt Agar EX with Egg Yolk, Modified

製品コード **51031**

包装 10枚

希望納入価格 2,600円

### 使用法

本品は無菌的に調製されているので、そのまま使用することができるが、平板培地の表面が凝固水で湿っているときは、乾燥させてから使用する。2種類の培地がシャーレ中央の隔壁よりも高く充填されているので、検体の塗布は1ステップで行うことができる。また、スパイラルプレータ等の自動機器にも適用できる。

本培地は、臨床材料などからのMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)と黄色ブドウ球菌を同時に分離培養できる分画培地で、1枚の培地で同時培養が可能である。

### 貯法・使用期限

4~10℃に保存(禁凍結)。  
2.5カ月間。

### 組成

培地1L中  
本品は2分画シャーレプロムクレゾールパープル(BCP)を抜いたMS-CFX寒天培地と変法卵黄加マンニット食塩寒天培地EXをそれぞれ無菌的に分注し、凝固させたものである。