

# 生培地

ニッスイプレート

## CCMA培地 EX

Nissui Plate CCMA EX

製品コード **51034**

包装 10枚

希望納入価格 4,500円

### 使用法

本品は無菌的に調製され、嫌氣的条件下で袋に入れてあるので、そのまま使用することができる。平板培地の表面が過度に湿っているときは、嫌氣的条件下で乾燥させてからPRAS(Pre-Reduced Anaerobically Sterilized)培地として用いる。

本品は臨床材料からの*Clostridium difficile*の選択分離培養に適する。

### 注意

*Clostridium difficile*は酸素に触れると死滅しやすいので、分離操作は嫌気チャンバー内で行うのが望ましい。

*Clostridium difficile*はR型の黄色集落を形成する。このとき、集落周辺の培地も黄色を呈する。

### 貯法・使用期限

4~10℃に保存(禁凍結)。  
3カ月間。

### 備考

微生物検査必携(1987)

### 組成

培地1L中  
肉ペプトン ..... 40.0g  
塩化ナトリウム ..... 2.0g  
硫酸マグネシウム ..... 0.1g  
発育素 ..... 1.0g  
マンニット ..... 10.0g  
ニュートラルレッド ..... 0.04g  
カンテン ..... 18.0g  
選択剤 ..... 0.27g  
pH7.3 ± 0.2