

# 生培地

ニッスイプレート

## ヘリコバクター寒天培地「ニッスイ」

Nissui Plate Helicobacter Agar

製品コード **51035**

包装 10枚

希望納入価格 3,600円

### 使用法

本品は無菌的に調製されているので、そのまま使用することができるが、平板培地の表面が凝固水で湿っているときは、乾燥させてから使用する。

本培地はヘリコバクター・ピロリの分離用培地で、スキロー培地に発育困難なヘリコバクター・ピロリを微好氣的条件下で発育させることができる。また、選択剤の添加により、緑膿菌などの雑菌とともに酵母様真菌の発育も抑制する。

ヘリコバクター・ピロリは、本培地上で紫色の集落を形成する。

### 貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。  
2.5カ月間。

### 組成

培地1L中  
ペプトン..... 15.0g  
ダイズペプトン..... 5.0g  
塩化ナトリウム..... 5.0g  
発色試薬..... 25mg  
選択剤..... 20mg  
カンテン..... 15.0g  
ウマ血清..... 100mL

pH7.3±0.1

上記組成の培地を常法通り調製し、無菌的にシャーレに分注し、凝固させたものである。