

生培地

ニッスイプレート

GM加GAM寒天培地

Nissui Plate GAM Agar with GM

製品コード **51039**

包装 10枚

希望納入価格 4,000円

使用法

本品は無菌的に調製され、嫌氣的条件下で袋に入れてあるので、そのまま使用することができる。平板培地の表面が過度に湿っているときは、乾燥させてから使用する。特に、PRAS培地として用いるときは、嫌氣的条件下で乾燥させる。

本培地では大部分の通性嫌氣性菌の発育が阻止され、発育する集落はほとんど偏性嫌氣性菌である。

しかし、ゲンタマイシン耐性の通性嫌氣性菌が混在しているときは発育することがあるので、発育した集落はすべて好氣性発育のないことを確認する。

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
4カ月間。

組成

本品はGAM寒天培地「ニッスイ」にゲンタマイシン25mg/Lを加えて常法通り調製し、無菌的にシャーレに分注し、凝固させたものである。