

# 生培地

ニッスイプレート

## NV加ABHK寒天培地

Nissui Plate ABHK Agar with nalidixic acid and vancomycin

製品コード **51041**

包装 10枚

希望納入価格 4,500円

### 使用法

本品は無菌的に調製され、嫌氣的条件下で袋に入れてあるので、そのまま使用することができる。平板培地の表面が過度に湿っているときは、乾燥させてから使用する。特に、PRAS(Pre-Reduced Anaerobically Sterilized Medium)培地として用いるときは、嫌氣的条件下で乾燥させる。

本培地は、ブルセラ寒天をベースに、発育因子としてヘミン、L-アルギニン、ビタミンK<sub>1</sub>およびウサギ溶血液が添加されているため、嫌氣性菌全般にすぐれた発育性能を示し、黒色色素産生菌の鑑別も明りょうである。

ナリジクス酸およびバンコマイシンが処方されているため、嫌氣性グラム陰性菌を選択的に発育させる。

### 貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。  
3カ月間。

### 組成

培地1L中  
ペプトン.....20.0g  
酵母エキス.....2.0g  
L-アルギニン.....1.0g  
L-システイン塩酸塩.....0.4g  
ブドウ糖.....1.0g  
塩化ナトリウム.....5.0g  
亜硫酸ナトリウム.....0.1g  
ビルビン酸ナトリウム.....1.0g  
ヘミン.....10mg  
ビタミンK<sub>1</sub>.....10mg  
カンテン.....15.0g  
ウサギ溶血液.....30mL  
ナリジクス酸.....10mg  
バンコマイシン.....2.5mg  
pH7.1 ± 0.1