

## 分画培地

ニッスイ分画プレート

# ABHK寒天／NV加ABHK寒天

Nissui Separated Plate ABHK Agar/ABHK Agar with nalidixic acid and vancomycin

製品コード **51043**

包装 10枚

希望納入価格 5,000円

### 使用法

本品は無菌的に調製され、嫌気的条件下で袋に入れてあるので、そのまま使用することができる。培地表面が過度に湿っているときは、乾燥させてから使用する。特に、PRAS(Pre-Reduced Anaerobically Sterilized)培地として用いるときは、嫌気的条件下で乾燥させる。2種類の培地が、シャーレ中央の隔壁よりも高く充てんされているので、検体の塗布は1ステップで行うことができる。

ABHK寒天培地は、嫌気性菌全般を発育させ、黑色色素産生菌も鑑別できる。NV加ABHK寒天培地は嫌気性グラム陰性菌を選択的に発育させる。

### 注意

検体を塗布した際、発育する菌種、培養時間によっては隔壁付近の一部に培地間の影響が見られる場合がある。

### 貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。  
3カ月間。

### 組成

本品は2分画シャーレに、ABHK寒天培地と、NV加ABHK寒天培地をそれぞれ無菌的に分注し、凝固させたものである。

ABHK寒天培地、NV加ABHK寒天培地の組成については生培地(ニッスイプレートABHK寒天培地、ニッスイプレートNV加ABHK寒天培地)参照。