

## 腸内細菌分離用

ニッスイプレート

# Sタイプ寒天培地

Nissui Plate S type Agar

製品コード

**51056**

包装

**10枚**

希望納入価格

**1,000円**

### 製品概要

本品はサルモネラの鑑別性を高め検便検査用培地である。サルモネラと赤痢菌以外の腸内細菌科細菌は概ね抑制さる。

### 貯法・使用期限

冷所（4～10℃）に保存（禁凍結）。  
3ヵ月。

### 基本組成

培地 1L中	
ペプトン	.....2.0g
酵母エキス	.....2.0g
肉エキス	.....3.0g
胆汁酸塩	.....5.0g
乳糖	.....7.5g
糖類	.....10.5g
クエン酸ナトリウム	.....0.8g
チオ硫酸ナトリウム	.....3.0g
クエン酸鉄アンモニウム	.....1.0g
発育因子	.....3.5g
ニュートラルレッド	.....20.0mg
プリリアントグリーン	.....0.3mg
カンテン	.....15.0g

pH：7.1±0.2

### 使用法

糞便検体を白金耳等を用いて画線塗抹し、35～37℃で18～24時間、好気培養する。

### 参照



**日水製薬株式会社**

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A