

腸内細菌分離用

ニッスイ分画プレート

Sタイプ/X-EHEC II

Nissui Separated Plate S type/X-EHEC II

製品コード **51060**

包装 **10枚**
希望納入価格 **2,000円**

製品コード **50055**

包装 **100枚**
希望納入価格 **20,000円**

製品概要

本品はサルモネラの鑑別性を高めたSタイプ寒天培地とEHEC選択分離用の発色酵素基質培地（X-EHEC II寒天培地）を1枚のプレートにした検便検査用培地である。

使用法

糞便検体を白金耳等を用いて画線塗抹し、35～37℃で18～24時間、好気培養する。

貯法・使用期限

4～10℃に保存（禁凍結）。
2.5カ月。

参照

基本組成

本品は、2分画シャーレにSタイプ寒天培地とX-EHEC II寒天培地をそれぞれ無菌的に分注し、凝固させたものである。



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A